


# OSSTEM<sup>®</sup>

ESPAÑA

Sistema de Micro Soluciones.

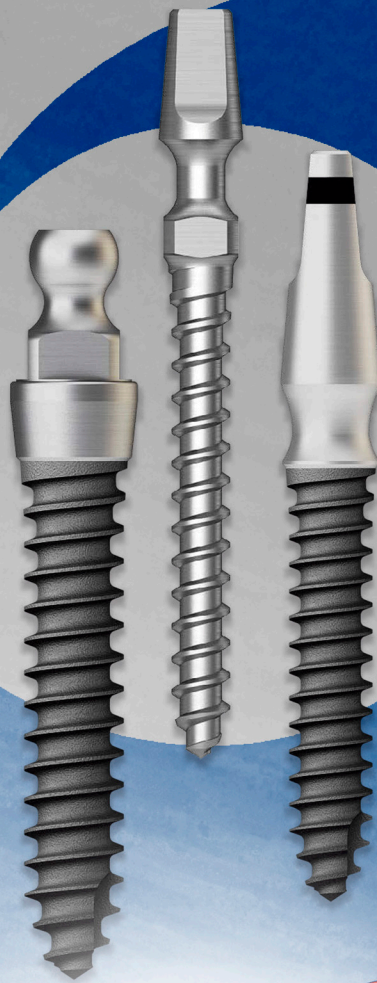

# MS

System



# MS

Narrow Ridge

Denture

Provisional



## Sistema MS

- Mini implante monobloque, diseñado para casos de espacios estrechos tales como el sector anteroinferior.
- Tratamiento de superficie a base de arenado con óxido de alúmina y grabado ácido (SA).
- Diseñados para una inserción impecable con una excelente estabilidad.
- Forma y tamaño del pilar optimizados para el trabajo protésico.
- Torque óptimo de inserción: 30Ncm.

### Narrow Ridge

Implante adecuado para cresta estrecha o zona anteroinferior.

### Denture

Implante de prótesis adecuado para pacientes edéntulos con hueso estrecho.


### Provisional

Implante temporal utilizado para prótesis provisional inmediata.



## Superficie optimizada mediante tratamiento de grabado ácido

Rugosidad de la superficie: Ra 2.0-3.0µm.  
La rugosidad en la parte superior de 0,5 mm es Ra 0.5-0.6µm.  
Superficie con micro fisuras uniformes de 1-3µm.  
Su área de superficie aumenta en un 46% comparada con implantes tratados con RBM

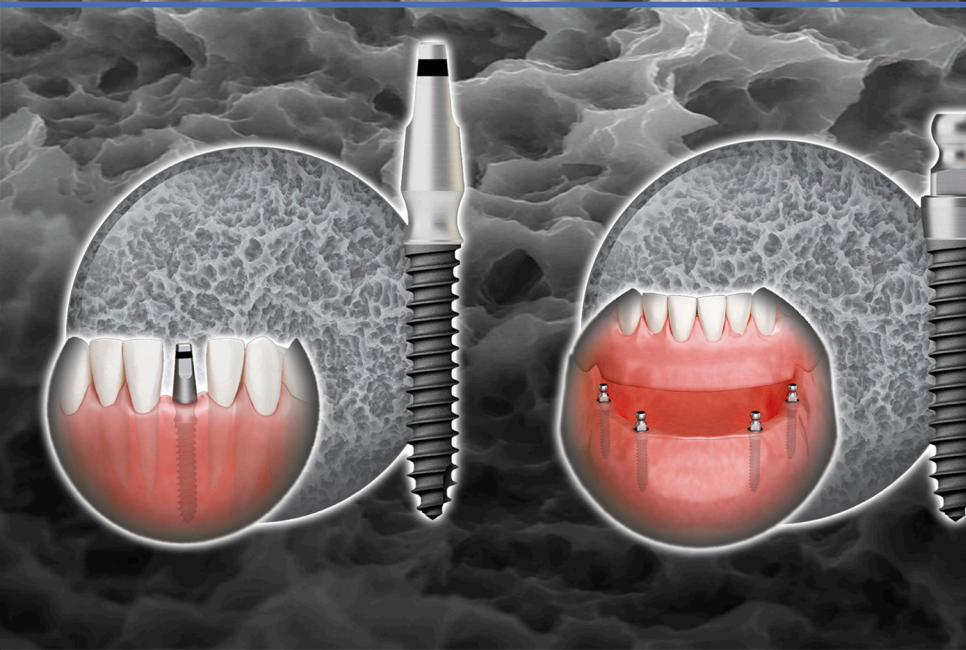


# MS kit




## Secuencia de fresado

Ø1.8mm

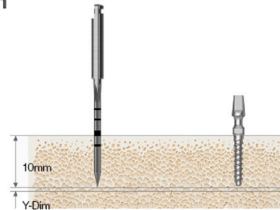


Bone Quality	Lance Drill	Ø1.8 Implant
Soft	▶	Implant Placement
Normal	▶	
Hard	▶	

Ø2.0mm

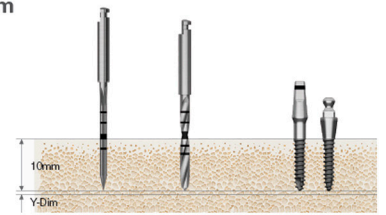


Bone Quality	Lance Drill	Drill (Ø1.8)	Ø2.0 Implant
Soft	▶		Implant Placement
Normal	▶		
Hard	▶	▶	

Ø2.5mm

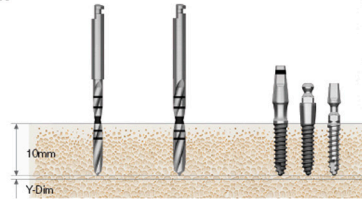

Bone Quality	Drill (Ø1.8)	Drill (Ø2.0)	Ø2.5 Implant
Soft	▶		Implant Placement
Normal	▶		
Hard		▶	

Ø3.0mm

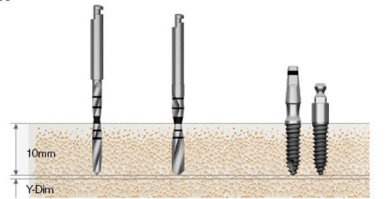


Bone Quality	Drill (Ø1.8)	Drill (Ø2.5)	Ø3.0 Implant
Soft	▶		Implant Placement
Normal	▶		
Hard		▶	

MS

Rehabilitación




## MS SA Implant Narrow Ridge

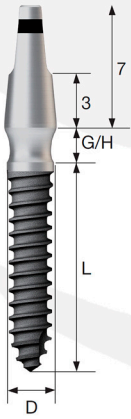


D	Ø	G/H	L	8.5	10	11.5	13
D Ø2.0	G/H	L					
	2.5			MSN2008S25	MSN2010S25	MSN2011S25	MSN2013S25
	4.0			MSN2008S40	MSN2010S40	MSN2011S40	MSN2013S40
D Ø2.5	G/H	L					
	2.5			MSN2508S25	MSN2510S25	MSN2511S25	MSN2513S25
	4.0			MSN2508S40	MSN2510S40	MSN2511S40	MSN2513S40
D Ø3.0	G/H	L					
	2.5			MSN3008S25	MSN3010S25	MSN3011S25	MSN3013S25
	4.0			MSN3008S40	MSN3010S40	MSN3011S40	MSN3013S40

## MS SA Implant Denture

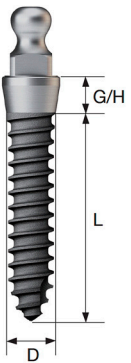

D	Ø	G/H	L	8.5	10	11.5	13
D Ø2.0	G/H	L					
	2.0			MSD2008S20	MSD2010S20	MSD2011S20	MSD2013S20
	4.0			MSD2008S40	MSD2010S40	MSD2011S40	MSD2013S40
D Ø2.5	G/H	L					
	2.0			MSD2508S20	MSD2510S20	MSD2511S20	MSD2513S20
	4.0			MSD2508S40	MSD2510S40	MSD2511S40	MSD2513S40
D Ø3.0	G/H	L					
	2.0			MSD3008S20	MSD3010S20	MSD3011S20	MSD3013S20
	4.0			MSD3008S40	MSD3010S40	MSD3011S40	MSD3013S40

## MS Implant Provisional

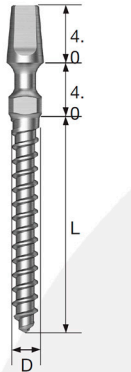

D	Ø	L	10	13	15
D Ø1.8	L				
			MST18104	MST18134	MST18154
D Ø2.5	L				
			MST25104	MST25134	MST25154

Observaciones:



**OSSTEM**<sup>®</sup>

STYLE YOUR SMILE

Síguenos en: Osstem Implant España osstem\_implant\_españa Osstem España Osstem Implant España

Osstem Implant Spain S.L. CIF B10993145 Av. Manoteras 32 B 1b 28050 Madrid 91 013 69 49